

Vaginal-Zäpfchen mit Myo-Inositol für pH-Wert 6

ZUSAMMENSETZUNG

Ein Vaginal-Zäpfchen zu 1 g enthält 2,00 mg Myo-Inositol, 998,00 mg halbsynthetische Glyceride.

PRODUKTKATEGORIE

Medizinprodukt.

DARREICHUNGSFORM

Vaginal-Zäpfchen.

KLINISCHE ANGABEN

DER BEFRUCHTUNGSVORGANG

Die Eigenschaften der Spermienflüssigkeit und das Scheidenmilieu spielen bei der Befruchtung eine wesentliche Rolle. Indikatoren für die fruchtbaren Tage einer Frau sind insbesondere die Bestimmung des Zeitpunkts während des Menstruationszyklus, die Beurteilung des Zervixschleims, die Basaltemperatur und die Anwendung von elektronischen Geräten zur Hormonbestimmung. Während des Menstruationszyklus tritt etwa zu Beginn der fruchtbaren Zeit (zwischen dem 9. und 11. Zyklustag) der Zervixschleim in Erscheinung. Der Schleim verändert sich und nimmt bis zum Eisprung (13. - 15. Tag) an Menge und Fluidität zu und zieht Fäden. Anschließend bilden sich die Eigenschaften wieder zurück. Während des Eisprungs erleichtert es der reichlich vorhandene, flüssige, klare Zervixschleim den Spermien, die Eizelle zu erreichen. Unter diesen Bedingungen wird die Spermienflüssigkeit besonders vor dem sauren Scheidenmilieu geschützt. Der relativ alkalische pH-Wert des Zervixschleims schützt die Spermien und erhält sie vital.

EIGENSCHAFTEN

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Präparat auf der Basis von Myo-Inositol, dessen lokale Anwendung optimale Bedingungen für die Befruchtung der Eizelle schafft. Myo-Inositol trägt dazu bei, den Zervixschleim und die Spermienflüssigkeit dünnflüssiger zu machen, sodass die Wanderung der Spermien zur Eizelle erleichtert wird. Dank seiner antioxidativen Eigenschaften schützt Myo-Inositol die Spermien vor den Auswirkungen von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS), die natürlich im Scheidenmilieu vorkommen. Die Zusammensetzung von consiva®F Vaginal-Zäpfchen erzeugt einen optimalen pH-Wert für die Lebensfähigkeit der Spermien und gleicht das saure Milieu der Scheide aus, das für die Inaktivierung der Spermien verantwortlich ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

consiva®F Vaginal-Zäpfchen erhöht bei spontanen oder eingeleiteten Zyklen die Befruchtungs- und Schwangerschaftswahrscheinlichkeit, indem es in der Scheide günstige Bedingungen für die Funktionalität der Spermien schafft. Die Anwendung von consiva®F Vaginal-Zäpfchen unterstützt Paare in Verbindung mit einer sorgfältigen Planung des Geschlechtsverkehrs bei der Empfängnis.

GEGENANZEIGEN

Bekannte Überempfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe.

NEBENWIRKUNGEN

In einigen Fällen kann es zu einer Unverträglichkeit kommen (Brennen oder Reizung), die jedoch keine weiteren Auswirkungen hat und keine Änderung der Behandlung erfordert. Informieren Sie bitte ihren Arzt oder Apotheker über alle unerwünschten Wirkungen, von denen Sie annehmen, dass sie durch das Produkt hervorgerufen worden sind.

AUSWIRKUNGEN AUF DIE VERKEHRSTÜCHTIGKEIT UND FÄHIGKEIT ZUM BEDIENEN VON MASCHINEN

Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen sind nicht bekannt.

DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG

Jeden zweiten Tag während der Phase um den Eisprung (vom 11. bis 16. Tag bei einem regelmäßigen Zyklus von 28 Tagen) vorsichtig ein Zäpfchen in die Scheide einführen (möglichst am Abend vor dem Zubettgehen). Diese Phase kann mit elektronischen Geräten zur Hormonbestimmung und/oder durch direkte Beurteilung des Zervixschleims bestimmt werden. Der Geschlechtsverkehr sollte frühestens 6 Stunden nach Einführung des Zäpfchens erfolgen.

ÜBERDOSIERUNG

Bisher wurden keine Symptome einer Überdosierung festgestellt.

WARNHINWEISE

Insbesondere die längere Anwendung von lokal wirksamen Produkten kann zu einer Überempfindlichkeit führen. Das Produkt darf ausschließlich in die Scheide eingeführt werden. Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe das Produkt nicht anwenden. Das Produkt darf nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwendet werden. Bei beschädigter Verpackung und/oder Blistern das Produkt nicht anwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht verschlucken.

BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE AUFBEWAHRUNG

Bei einer Temperatur von 0 bis 25 °C lichtgeschützt, trocken und nicht in der Nähe von Wärmequellen aufbewahren.

INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

3 Vaginal-Zäpfchen zu je 1 g.

Stand der Information: 30.07.2018

Medizinprodukt  0373

HERSTELLER:

Lo.Li. Pharma S.r.l.

Via Sabatino Gianni, 14
00156 Rom, Italy

VERTRIEB DEUTSCHLAND:

APOGEPHA Arzneimittel GmbH

Kyffhäuserstr. 27
01309 Dresden
Tel. 0351/ 3363-3

info@apogepha.de
www.consiva-info.de